


MONO

UNILATERALER HEADGEAR

"... der erste, unilaterale Headgear, zur absolut einseitigen Distalisation von Zähnen mit Kräften bis 2000gr! (Mittellinienkorrekturen, KI II- Behandlungen im OK oder KI III- Behandlungen im UK). Aber auch zur einseitigen In- oder Extrusion von Zähnen."

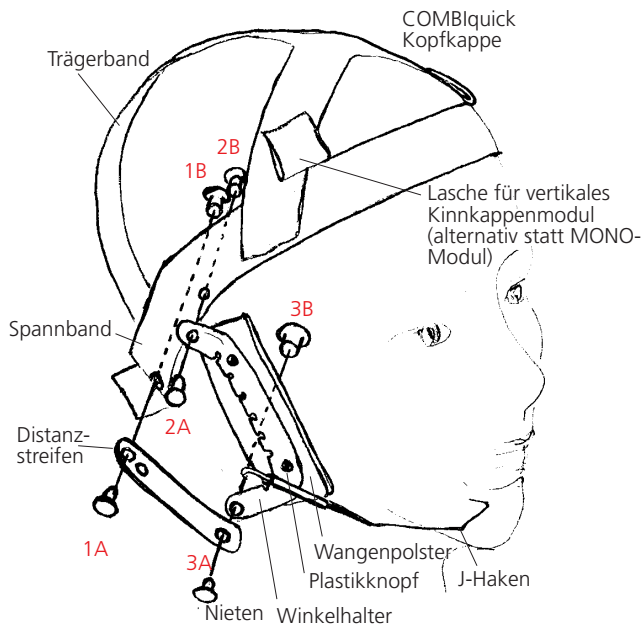

Bestellnummer:

- O MONO-M (Standard)
- O MONO-L (Large)

Inhalt: 1 Stk COMBIquick Kopfkappe, 1 Stk J-Hakenmodul, 5 Stk Reservegummis, 1 Stk Reserveniete, 2 Stk Falter.

Musterschutz erteilt.

© TIGER DENTAL H. WINSAUER BELRUPTSTRASSE 59 A-6900 BREGENZ


Aufbauanleitung für MONO-Set:

Das MONO-Set besteht aus der COMBIquick Kopfkappe und einem wahlweise links oder rechts anzubringenden Kraftmodul (MONO-Modul).


Bei der Entnahme aus der Verpackung ist beiseits das Monomodul **rechtseitig** angesteckt. Fall Sie zufällig einen einseitigen Headgear rechts benötigen sollten, brauchen Sie nur noch die **drei Stück Nieten festklopfen** (Hammer gegen harte Unterlage). Falls Sie jedoch einen **linksseitigen** Headgear wollen, so müssen Sie das MONOmodul **seitenverkehrt** auf die Gegenseite montieren.

- 1.) Beginnen Sie am besten beim **J-Haken-Rohr**. Sie drehen das Rohr um 180°. Dann kippen Sie es nach innen und können es aushängen (siehe auch Skizzen auf der Rückseite des beiliegenden Falters).
- 2.) Ziehen Sie nun die **drei Niete** auseinander und entfernen die beiden **Plastikknöpfe**, die das Wangenpolster halten.
- 3.) **Montieren** Sie die Teile wieder **seitenverkehrt** und quetschen Sie die **drei Niete mit leichten Hammerschlägen**.

Die Ösenöffnungen gerade so weit offen lassen, dass J-Haken beim Ein- und Aushängen leicht klemmt

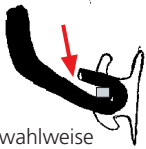

J-Haken je nach Seite wahlweise von cranial oder caudal einhängen.

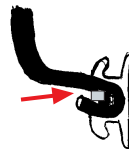


Nieten werden mit ein oder zwei Hammerschlägen gequetscht.



harte Unterlage, ev. 2. Hammer oder Platte

Relativ schlau, dieser MONO...

Tip: Falls das Spannbänder über dem Ohr zu tief sitzt, kann es einfach mit der Schere etwas ausgeschnitten werden. Versuchen Sie jedoch zuvor, das Trägerband straffer zu spannen.

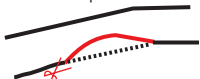

Niethammer und Nietunterlage bei Tiger Dental bestellen!

Bitte beachten Sie, daß zur Sicherheit vor Verletzungen das hintere Ende des J-Hakens stets umgebogen werden muß!



Die Anleitung zum **Anpassen des MONO-Headgears am Kopf** entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Falter.

