



Ergänzende Hinweise zur Sterilisationsanleitung des

Dual-Top™ Anchor-Systems

Gebrauchsanleitung für kieferorthopädische Minischrauben mit Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für medizinische Anwender und Patienten.

Handschraubendreher-Griff, Schraubendreher-Schäfte sowie Pilotbohrer sind für die Dampfsterilisation bei 134°C und einer Haltezeit von 18 Minuten geeignet.

Die Abbildung enthält beispielhaft einige, der unter diesen Modus fallende Instrumente.



140801/HA

PROMEDIA MEDIZINTECHNIK

A. Ahnfeldt GmbH
Hartwig Ahnfeldt (QM-Beauftragter)
Marienhütte 15
57080 Siegen

Telefon: 0271 - 31 460-325
Telefax: 0271 - 31 460-80
E-Mail: h.ahnfeldt@promedia-med.de