

Tiger Dental

Reflex Patientenspiegel LED – Gebrauchsanweisung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses innovative Produkt aus dem Hause TigerDental entschieden haben.

Um eine sichere und optimale Anwendung dieses Produktes zu gewährleisten, muss diese Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen und beachtet werden.

Die Gebrauchsanweisung deckt alle notwendigen Sicherheitshinweise ab, kann aber nicht alle Gegebenheiten einer möglichen Anwendung beschreiben. Deshalb finden Sie im Internet unter tigerdental.com im (Menüpunkt „Know-how“) zusätzliche Anwendungshinweise. Zudem steht Ihnen unser Kundenservice für Fragen gerne zur Verfügung.

Die fortlaufende Weiterentwicklung unserer Produkte zeichnet uns als innovatives Unternehmen aus. Daher empfehlen wir Ihnen auch nach mehrfacher Verwendung das aufmerksame Durchlesen der beiliegenden bzw. im Internet (tigerdental.com, Menüpunkt Downloads) hinterlegten Gebrauchsanweisung.

1. Hersteller

TigerDental e.U., Belruptstraße 59, 6900 Bregenz, Austria

2. Produktbeschreibung

Der Reflex Kommunikator LED ist ein leuchtengetragener, wegklappbarer Patientenspiegel für die Sirona LEDview. Der seit Jahren auf Behandlungsleuchten mit Halogentechnik bewährte Patientenspiegel steht nun auch für die Sirona LEDview zur Verfügung. Der Reflex Patientenspiegel LED Patientenspiegel übernimmt auf einfachste Weise die Funktion eines Vermittlers zwischen Zahnarzt und Patient. Durch die sichere Montage des Patientenspiegels direkt auf die Behandlungsleuchte, kann der Patient mit eigenen Augen mitverfolgen, was in seinem Mund vor sich geht. So entsteht Vertrauen ohne viele Worte.

Doch der Behandler kann den Spiegel jederzeit per Knopfdruck wegklappen. So bleibt Beängstigendes nach wie vor unsichtbar.

3. Anwendungsbereiche

- Kieferorthopädie
- MundhygienesDemonstrationen
- Beratungsgespräche
- Parodontose Sitzungen
- als „Angstlöser“ bei Kindern und Erwachsenen

4. Montageanleitung

Packungsinhalt


- 1× Reflex Patientenspiegel (inkl. Spiegelhalter, angebrachter Sicherheitsfaden mit Messingring, Doppelklebestreifen)
- 1× Innensechskant-Schlüssel, Gr. 2 mm

Überprüfung vor der Montage

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle in der Inhaltsangabe aufgeführten Bestandteile im tatsächlichen Lieferumfang enthalten sind.
2. Schneiden Sie die beigegefügte Montageschablone sorgfältig mit einer Schere aus und legen sie bereit.
3. Überprüfen Sie ob die Klebebereiche der Leuchte sauber sind, ggf. reinigen Sie diese mit einer alkoholischen Lösung.
4. Legen Sie außerdem eine Weingart- oder Spitzzange bereit.



1 Mittige Positionierung (Montageschablone für Sirona LEDview), die beiden Positionierungsstifte verschwinden in der Leuchtenut

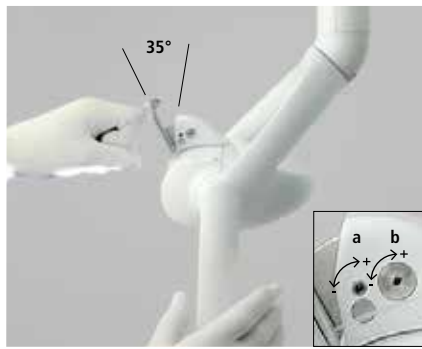

2 Max. Schwenkbereich 35°, Detail: a) Einstellung der Klemmung der Spiegelschwenkung, b) Einstellung des Winkels der Spiegelschwenkung



3 Sichern des Silchs durch das Klemmen der Öse

Die Montage

1. Legen Sie die Montageschablone passgenau mittig auf die obere Leuchtenfläche, so dass die leicht gebogene Vorderkante entlang der Gehäusenut verläuft, und fixieren Sie die Schablone mit Klebeband am Leuchtengehäuse. Die aufgezeichnete Markierung ermöglicht nun die mittige Positionierung der Spiegelhalterung auf der Leuchte.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen an der Spiegelhalterung ab und platzieren Sie zuerst die Positionierungsstifte des Halters in der Gehäusenut der Leuchte. Nun drücken Sie mit einer Hand, ausgehend von hinten nach vorne, den Spiegelhalter auf die Leuchtenfläche auf, wobei Sie die Leuchte mit der zweiten Hand von unten abstützen.
3. Drücken Sie die Spiegelhalterung ca. 15 Sekunden fest an das Leuchtengehäuse an.
4. Lösen Sie die Bänder am Nylonfaden (Silch) und führen Sie ihn mit etwas Spiel seitlich einmal um das Drehgelenk der Leuchte (Abb. 3), damit der Spiegel gesichert ist. Nun führen Sie das Ende durch das Klemmröhrchen und straffen die Schlaufe nach Bedarf. Anschließend wird durch leichtes Quetschen mit einer Zange der Nylonfaden im Röhrchen fixiert und das überstehende Ende entfernt.
5. Der Spiegel ist ab diesem Zeitpunkt einsatzbereit. Feinkorrekturen des Anstellwinkels sind auch später über die exzentrische Stellschraube durchführbar (Abb. 2 und Detail). Bitte achten Sie darauf den Nylonfaden, welcher sich an dem Spiegel befindet unbedingt an der Leuchte zu fixieren. Da der Spiegel lediglich auf die Leuchte geklebt ist, besteht das Risiko, dass dieser von der Leuchte abfällt.

5. Verwendungshinweis

Um einen optimalen Gebrauch zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass die Spiegelfläche stets gereinigt ist und weisen Sie auch Ihre Assistentinnen ein. Wichtige Punkte hierbei sind:

1. Klären Sie mit dem Patienten vorab, ob das Mitschauen erwünscht ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Patient im Spiegel das Geschehen im Mund gut verfolgen kann.
3. Klappen Sie je nach Situation den Spiegel während der Behandlung weg.

6. Sicherheitshinweise

Der Reflex Patentspiegel ist patentrechtlich geschützt. 11/2009

7. Inhalt

REF 10818 Reflex Patientenspiegel LED, für Sirona LEDview

8. Qualitätshinweise


TigerDental versichert dem Anwender eine einwandfreie Qualität der Produkte. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung beruht auf eigener Erfahrung. Der Anwender ist für die Verarbeitung der Produkte selbst verantwortlich. In Ermangelung einer Einflussnahme von TigerDental auf die Verarbeitung durch den Anwender besteht keine Haftung für fehlerhafte Ergebnisse. Obwohl der Reflex Patientenspiegel ein ausgereiftes Produkt ist, können Verbesserungen und Änderungen erfolgen, die möglicherweise nicht in der vorliegenden Gebrauchsanweisung dokumentiert sind. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für Druckfehler.

9. Erklärung der verwendeten Symbole

Erklärung zu verwendeten Symbolen der ÖNORM EN ISO 15223-1 finden Sie unter: www.tigerdental.com/downloads
Änderungen vorbehalten.

Tiger Dental

Montageschablone – Reflex Patientenspiegel LED

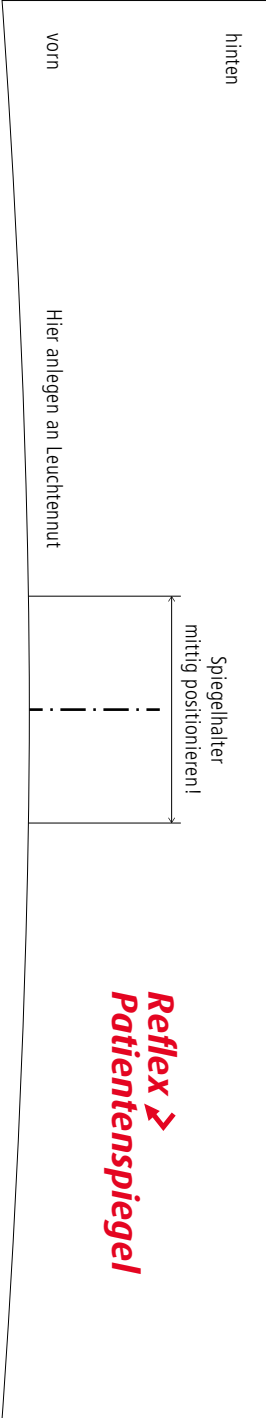

Klebeschablone bitte entlang der Kontur ausschneiden!

10. Erklärung der verwendeten Symbole gemäß ÖNORM EN ISO 15223-1

	Europäische Konformität
	Hersteller
	Chargencode
	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung beachten

Informationen zu Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter:
For more information on our products and services, please visit:
www.tigerdental.com

Stand der Information:
Date of information:
V0.0/12/2017/11084

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications



Tiger Dental e.U., Belruptstr. 59,
6900 Bregenz, Austria, EU
www.tigerdental.com